

# DE USO PERSONAL REDUCE EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN E INFECCIÓN

- ✓ IMPERMEABLE
- ✓ TRANSPIRABLE
- ✓ LAVABLE
- ✓ REUTILIZABLE

CUMPLE CON LAS NORMAS  
**UNE 0065:2020**

**BFE 93,5%**

**Respirabilidad 27 Pa/cm<sup>2</sup>**

Nº y fecha del informe de ensayo: 2020TM1871 de 01/06/2020

Requisitos de materiales, diseño,  
confección, marcado y uso.

**Mascarillas higiénicas reutilizables  
de tela para adultos.**

## COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA



1 Lavarse las manos  
antes de su uso.



2 Identificar  
la parte superior  
de la mascarilla.



3 Posicionar a la altura de la  
nariz y colocar las gomas  
por detrás de las orejas.



4 Verificar que la  
mascarilla cubre  
de nariz a barbilla.



5 Pellizcar la pinza  
nasal para  
ajustarla a la nariz.



6 Una vez ajustada,  
no tocar la mascarilla  
con las manos.

### ADVERTENCIA:

Este dispositivo no es un  
producto sanitario en el  
sentido de la Directiva  
93/42 o del Reglamento  
UE / 2017/745, ni un  
equipo de protección  
individual en el sentido  
del Reglamento  
UE / 2016/425

Ensayo del producto tras 10 lavados:

**BFE 90,75% - Respirabilidad 21 Pa/cm<sup>2</sup>**


Nº y fecha del informe de ensayo: 2020TM1871 de fecha 01/06/2020

Según norma **UNE-EN 14683:2019+AC:2019**

**CERTIFICADA POR AITEX**

Composición de tejido: 80% poliéster 20% poliamida.

Estructura: Una única capa 126gr/m<sup>2</sup>

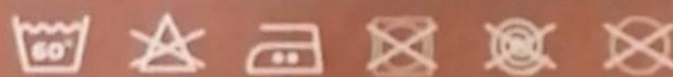

**MANTINENE SUS PROPIEDADES EN MÁS DE 10 LAVADOS**

Kabanayen S.L. NRI 49-4881. B49153378.  
www.angeliglesias.es  
Hecho íntegramente en España.

**ANGEL IGLESIAS**



La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad. Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica, por esta razón, la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser supervisada por un adulto.

### COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los pasos marcados en el anverso de esta hoja.

### RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir estos pasos:

1. Quitarse los guantes de protección, si lleva.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
4. Si se va a reutilizar la mascarilla, siga las *instrucciones de lavado y desinfección*, y si se va a desechar definitivamente, las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarramiento de la bolsa exterior. Se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

### INSTRUCCIONES DE LAVADO Y DESINFECCIÓN

Lavar a mano o a máquina en un ciclo normal de lavadora con detergente y agua a temperatura entre 60° - 90° sin centrifugado y dejar secar al aire libre.

Planchar a temperatura media. No usar secadora ni limpieza en seco.

### DURACIÓN DE USO MÁXIMO CONTINUADO

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones de retirada.

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara. No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

